



# KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES


KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES **AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE**



## kits ventilés




**KIT 2901**  
Kit de nébulisation ventilé avec masque adulte/ado + embout buccal

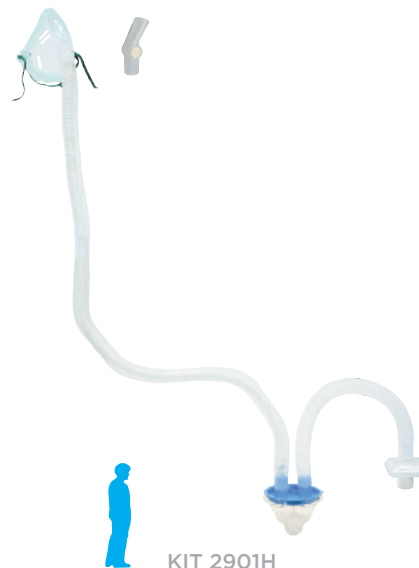

**KIT 2901H**  
Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque adulte/ado + embout buccal



**KIT 2901N**  
Kit de nébulisation ventilé avec masque enfant

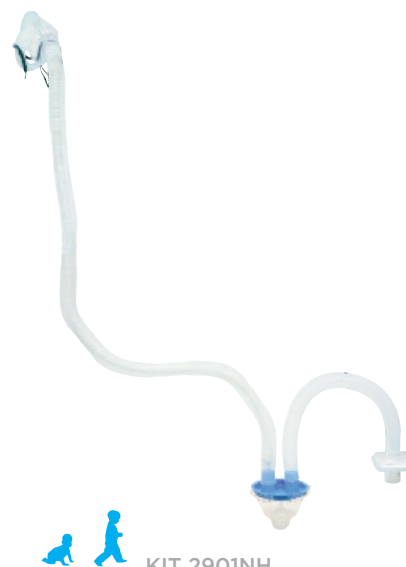

**KIT 2901NH**  
Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque enfant

## kits auto-déclenchés



**KIT 2301**  
Kit de nébulisation auto-déclenché avec masque adulte / ado et embout buccal



**KIT 2301LH**  
Kit de nébulisation auto-déclenché tubulure longue avec embout buccal



























AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE



PATIENT ÂGÉ DE PLUS DE 10 ANS



PATIENT ÂGÉ DE MOINS DE 10 ANS

TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	2901 REF 2901/5	2901H REF 2901H/10	2301 REF 2301/5	2301LH REF 2301LH/10	2901N REF 2901N/5	2901NH REF 2901NH/10	
DESCRIPTION	Kit de nébulisation ventilé avec masque adulte / ado + embout buccal	Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque adulte / ado + embout buccal	Kit de nébulisation auto-déclenché avec masque adulte / ado et embout buccal	Kit de nébulisation auto-déclenché tubulure longue avec embout buccal	Kit de nébulisation ventilé avec masque enfant	Kit de nébulisation ventilé tubulure longue avec masque enfant	
CONDITIONNEMENT 	par 5	par 10	par 5	par 10	par 5	par 10	
<b>CHOIX DE L'INTERFACE</b>							
	O.R.L.	  ++	  ++	  ++	 ++	 ++	 ++
	BRONCHES	++	++	++	++	++	++
	POUMON PROFOND	+++	+	+++	+	+++	+
<b>COMPOSITION DES KITS</b>							
Cupelle à médicament 	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2	
Couvercle 	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	
Control'Dose® 	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	
Filtre valvé 	x 1	x 1			x 1	x 1	
Filtre anti-poussière 	x 1	x 1			x 1	x 1	
Tubulure annelée (40 cm) 	2 x 40 cm	1 x 40 cm		1 x 40 cm	2 x 40 cm	1 x 40 cm	
Tubulure (segments de 15 cm) 		1 x 90 cm	1 x 15 cm			1 x 90 cm	
Embout buccal 	x 1	x 1	x 1	x 1			
Masque adulte 	x 1	x 1					
Masque enfant 					x 1	x 1	
Masque valvé 			x 1				
Valve 			x 1	x 1			
Coude à 45° 			x 1				

KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES POUR HUMIDIFICATION **H<sub>2</sub>O**


KIT 2901HUVN

Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille à pas de vis




KIT 2901HUPN

Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille percutable

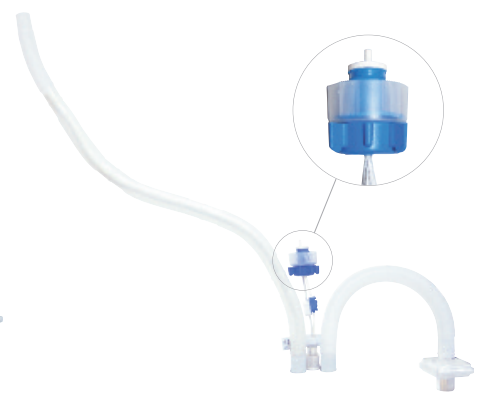





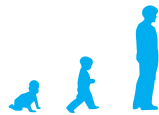






KIT 2901HUOV

Kit pour humidification en circuit ouvert pour bouteille à pas de vis




TOUS PATIENTS

TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	2901HUVN REF 2901HUVN/5	2901HUPN REF 2901HUPN/5	2901HUOV REF 2901HUOV/10
DESCRIPTION	Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille à pas de vis 	Kit pour humidification en circuit clos pour bouteille percutable 	Kit pour humidification en circuit ouvert pour bouteille à pas de vis 
CONDITIONNEMENT 	par 5	par 5	par 10
COMPOSITION DES KITS			
Filtre anti-poussière 	x 1	x 1	x 1
Tubulure annelée (40 cm) 	1 x 40 cm	1 x 40 cm	1 x 40 cm
Tubulure (segments de 15 cm) 	1 x 75 cm	1 x 75 cm	1 x 75 cm
Filtre anti-bactérien 	x 1	x 1	x 1
Chambre de nébulisation 	x 1	x 1	x 1
Ligne d'eau pour bouteille à pas de vis 	x 1		x 1
Ligne d'eau pour bouteille percutable 		x 1	



ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR HUMIDIFICATION EN CIRCUIT CLOS POUR TRACHÉOTOMIE / TRACHÉOSTOMIE

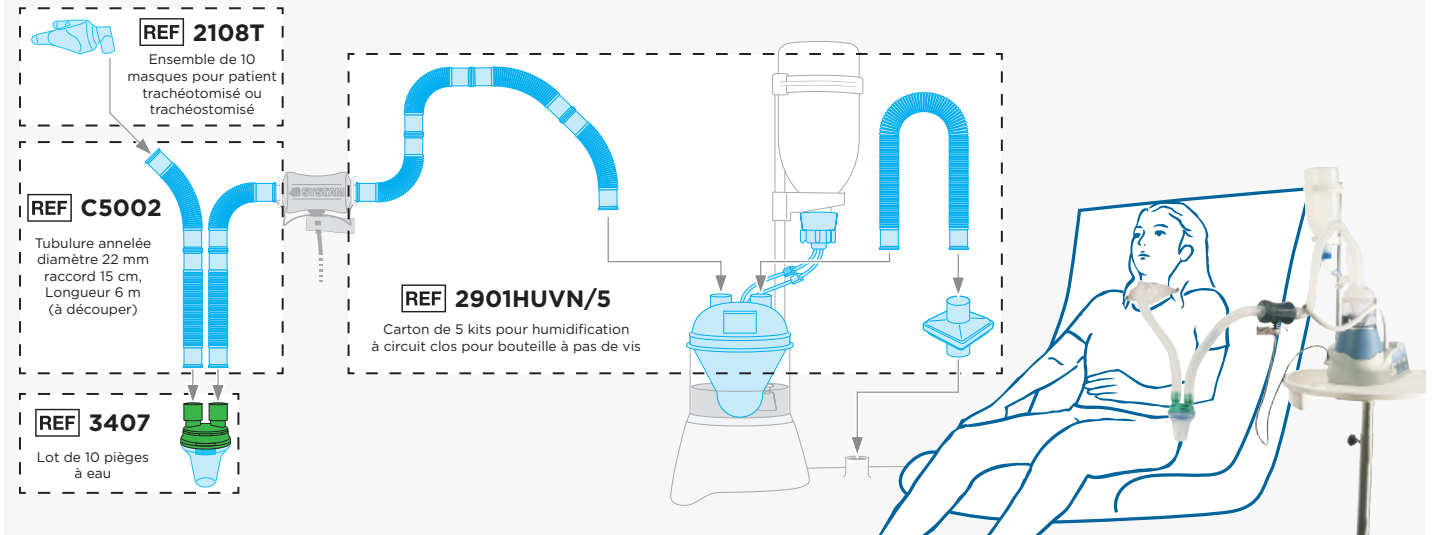

INTÉRÊT D'UN SYSTÈME CLOS À USAGE UNIQUE, SANS CONTACT DIRECT AVEC L'APPAREILLAGE (2901HUVN, 2901HUPN, 2901HUOV)

Les dispositifs proposant un circuit respiratoire ouvert peuvent potentiellement présenter un risque de contamination. Le système de consommable clos à usage unique prévient les risques de contamination manu-portée, empêche l'infiltration d'agents pathogènes, et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de traitement pour le patient.

L'HYGIÈNE MAÎTRISÉE

- Limitation de la contamination
- Circuit inspiratoire clos sans contact avec l'appareil

SYSTÈME UNIVERSEL, S'UTILISE AVEC LA PLUPART DES BOUTEILLES


- Eau distillée stérile ou solutions isotoniques stériles (500 ml ou 1000 ml à pas de vis ou percutables)
- La gestion des stocks et des achats s'en trouve facilitée
- Facilité d'installation et d'utilisation pour le personnel soignant

CONTRIBUE DE MANIÈRE GÉNÉRALE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS PAR :

- Une économie de temps
- Une plus grande sécurité pour le patient
- Une diminution du coût du traitement journalier
- Autorise une utilisation en aérosolthérapie médicamenteuse lors d'une séance d'humidification.



AUTORISE ÉGALEMENT UNE UTILISATION EN AÉROSOLTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE LORS D'UNE SESSION D'HUMIDIFICATION

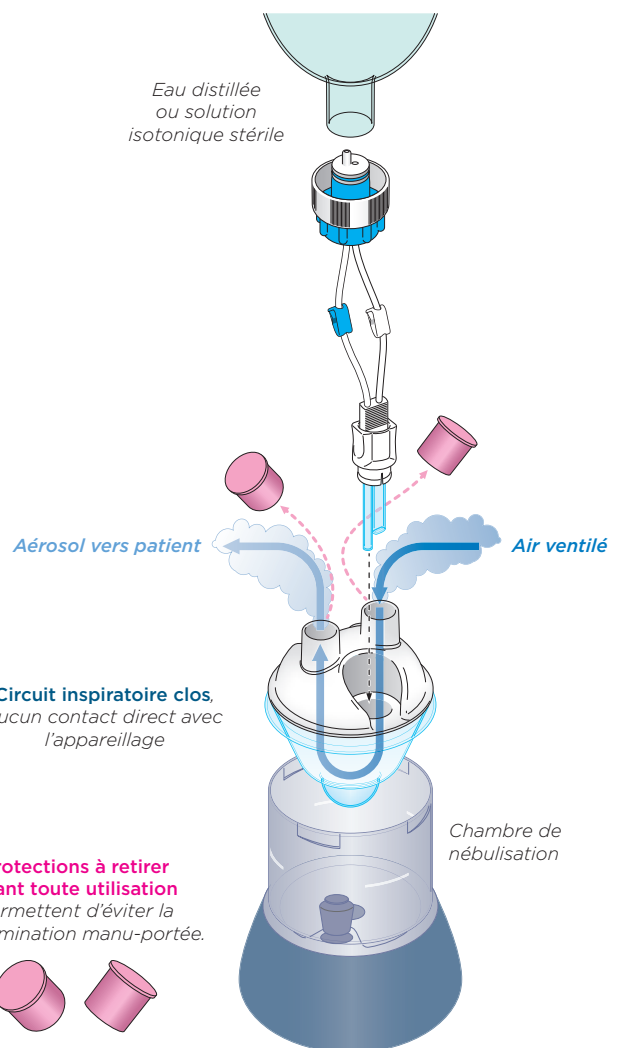



KITS CONSOMMABLES ULTRASONIQUES **SPÉCIAUX**



**2901RM**

**Kits de renouvellement ventilé pour patient longue durée avec tubulure lisse**  
(Chaque kit = 1 masque, 4 coupelles, 2 jeux de tubulures, 2 control'doses, 1 filtre anti-bactérien, 1 filtre anti-poussière)

**REF** 2901RM/10 : Carton de 10 kits



**2901RMN**

**Kit de renouvellement ventilé patient longue durée masque enfant et tubulure lisse** (1 masque, 4 coupelles, 2 jeux de tubulures, 2 control'doses, 1 filtre anti-bactérien, 1 filtre anti-poussière)

**REF** 2901RMN/10 : Carton de 10 kits



**KIT 2301RM**

**Kits de renouvellement auto-déclenché pour patient longue durée avec tubulure lisse**  
(Chaque kit = 1 embout buccal, 4 coupelles, 4 valves, 4 tubulures, 1 raccord en T, 2 control'doses\*, 1 couvercle)

**REF** 2301RM/10 : Carton de 10 kits



**KIT 2301RD**

**Kit de nébulisation auto-déclenché usage mensuel avec tubulure lisse**  
(2 embouts buccaux, 30 coupelles, 4 valves, 2 tubulures, 2 raccords en T, 2 control'doses\*, 2 couvercles)

**REF** 2301RD



**KIT 2301RDJ**

**Kit de nébulisation auto-déclenché usage journalier**  
(30 embouts buccaux, 30 coupelles, 60 valves, 30 tubulures, 30 raccords en T, 30 control'doses\*, 30 couvercles)

**REF** 2301RDJ



## CONSOMMABLES COMPLÉMENTAIRES AÉROSOLTHÉRAPIE &amp; HUMIDIFICATION

<b>REF</b>	<b>Désignation</b>
3415	Carton de 6 bouteilles pour humidification
3407	Carton de 10 pièges à eau
2700VN/10	Carton de 10 ensembles humidification pour bouteille à pas de vis (chambre de nébulisation + ligne alimentation)
2700PN/10	Carton de 10 ensembles humidification pour bouteille percutable (chambre de nébulisation + ligne alimentation)
2701N/18	Carton de 18 chambres de nébulisation seules
2703VN/40	Carton de 40 lignes d'alimentation (douilles de réalimentation inclus) pour bouteille à pas de vis
2703PN/40	Carton de 40 lignes d'alimentation (douilles de réalimentation inclus) pour bouteille percutable
2702VN/50	Carton de 50 lignes d'alimentation seules pour bouteille à pas de vis (kits ancienne version)
2702PN/50	Carton de 50 lignes d'alimentation seules pour bouteille percutable (kits ancienne version)
2004	Ensemble de 20 coupelles à médicaments + Control'Dose® + couvercle
2341	Ensemble de 100 coupelles à médicaments
2342	Ensemble de 50 couvercles de coupelle à médicaments
2108	Ensemble de 50 masques percés adaptables tubulure diam. 22 mm
2108E	Ensemble de 50 masques percés petit enfant adaptable tubulure 22 mm
2108T	Ensemble de 10 masques pour patient trachéotomisé ou trachéostomisé
2344	Ensemble de 50 embouts buccaux
2002	Ensemble de 10 filtres anti-bactérien et 10 filtres anti-poussière
3406	Ensemble de 50 filtres anti-poussière
2001	Ensemble de 20 tubulures annelées, chaque tubulure comprenant 2 grandes et 1 petite
C5002	Tubulure annelée diam. 22 mm raccord 15 cm, Lg. 6 m
<b>LUNETTES O2</b>	
CS1600	Carton de 50 lunettes à oxygène ADULTE - débit 6 l/min tubulure étoilée L. 2,10 m
CS1601	Carton de 50 lunettes à oxygène NOUVEAU NÉ (0 à 3 mois) - tubulure étoilée L. 2,10 m
CS1602	Carton de 50 lunettes à oxygène ENFANT (1 an et +) - tubulure étoilée L. 2,10 m
CS1615	Carton de 50 lunettes à oxygène NOURRISSON (3 à 12 mois) - tubulure étoilée L. 2,10 m
<b>HUMIDIFICATEURS O2</b>	
CS7100	Carton de 50 humidificateurs avec alarme sonore contenance 350 cc (pas de vis américain)
CS7100M	Carton de 50 humidificateurs avec alarme sonore contenance 350 cc (pas de vis européen)