

Aniospray Quick (Marque : Anios)

Option : Modèle - Bidon de 5L

A partir de 35,16 € T.T.C.

(Prix au 02/06/2023)



Description

Aniospray QuickIndications :

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie ...).

Composition :

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 550 mg/g), Propionate de N,N-didécy-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium (N°CAS 94667-33-1: 1,1 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. SARM (EN 14561) : 30 secondes

- Mycobactéries :

Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 : 30 secondes

Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563 : 5 minutes

- Levures :

Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 1369. : 30 secondes

Tricophyton mentagrophytes : EN 14562 : 30 secondes

- Moisissures : Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 13697. : 5 minutes

Virus :

P. 1 / 2

Pénalités pour retard de paiement : le taux d'intérêt sera égal à trois fois le taux légal
Une indemnité légale forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement pourra être réclamée.

Siège social : HEXAMED MATERIEL MEDICAL- 295, Route Nationale 97 - 83130 LA GARDE - France
RCS Toulon 510 281 553 - SIRET 51028155300030 - N° TVA: FR80510281553

Coordonnées bancaires : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3028 0000 0200 1876 056 - BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

- Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus* Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1) : 30 secondes

- Calicivirus Felin, Norovirus MNV : 5 minutes

Mode d'emploi :

- Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS Premium.

- Pulvériser uniformément sur les surfaces à traiter.

- Appliquer en quantité suffisante (+/- 40 ml/m²).

- Le rinçage est inutile, sauf si la surface est destinée à entrer en contact avec la peau et les muqueuses; respecter alors le temps de contact indiqué (30 secondes minimum) pour l'activité antimicrobienne recherchée (laisser porte et fenêtres fermées).

- S'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action.

Précautions d'emploi :

Dangereux – respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2)

Modèles au choix :

- 28182HBG : 12 flacons de 1 L + 4 pulvérisateurs

- 28183HBG : bidon de 5L

Conditionnement : à l'unité.

Déclinaisons

| | | |
|--|------------|--------------|
| Modèle - 1 L (12 flacons + 4 pulvérisateurs) | 96,52 € HT | 115,82 € TTC |
| Modèle - Bidon de 5L | 29,30 € HT | 35,16 € TTC |