

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés. (Marque : Anios)

Option : Modèle - 5 L (1 bidon)

A partir de 36,00 € T.T.C.

(Prix au 02/06/2023)



Description

Aniospray surf 29 est formulé sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante.

Son utilisation est compatible avec tous types de matériaux.

Durant l'application ou après séchage, il ne laisse pas de film gras ni de traces.

Indications :

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie,...)

Composition :

Ethanol (N° CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 0,53 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

Actif sur :

Bactéries : EN 1040, EN 13727, NF T 72-281 : 5 mn

Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 : 15 mn

P. 1 / 2

Pénalités pour retard de paiement : le taux d'intérêt sera égal à trois fois le taux légal
Une indemnité légale forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement pourra être réclamée.

Siège social : HEXAMED MATERIEL MEDICAL- 295, Route Nationale 97 - 83130 LA GARDE - France
RCS Toulon 510 281 553 - SIRET 51028155300030 - N° TVA: FR80510281553

Coordonnées bancaires : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3028 0000 0200 1876 056 - BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 30 mn

Virus : actifs selon 14476 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), herpèsvirus, vaccinia virus : 1 mn

Mode d'emploi :

- Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS.
- Pulvériser sur les surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie. (Volume à pulvériser : 80 ml/m²). Laisser la pièce fermée (porte et fenêtres) pendant 15 minutes minimum.
- Aérer si possible avant réutilisation.

Précautions d'emploi :

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : entre +5°C et +25°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP 2) - usage réservé aux professionnels.

Conditionnement :

- 12 flacons de 1L avec 4 pulvérisateurs
- 1 bidon de 5 litres
- 4 bidons de 5 litres

Déclinaisons

Modèle - 5 L (1 bidon)	30,00 € HT	36,00 € TTC
Modèle - 1 L (12 flacons + 4 pulvérisateurs)	90,83 € HT	109,00 € TTC
Modèle - 5 L (4 bidons)	115,83 € HT	139,00 € TTC