

Spray détergent désinfectant STERICID S-3DM



Spray nettoyant désinfectant pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux non-invasifs.

Dispositif médical classe IIa



Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immersibles et non-invasifs (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes échographiques, ...) et l'essuyage préliminaire des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant.



Formule

Actifs: Ethanol (< 3%), Propan-2-ol (< 1%), Diméthylbenzylammonium chloride

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.
- Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.



Mode d'emploi

Pulvériser STERICID sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm. Bien répartir le produit.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.



Précautions d'emploi

Aucun pictogramme de danger.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable. Stocker dans des conditions normales de température.



Conditionnement

REF : S-3DM

Spray 750ml avec dispenser moussant.

Carton de 6 sprays.

Palette de 100 cartons