

SURFA'SAFE Premium

Mousse détergente désinfectante des surfaces et des dispositifs médicaux



PRÊT A L'EMPLOI




Dès 3 min.

INDICATION


Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, câbles et connectiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexe...).

PROTOCOLE D'UTILISATION

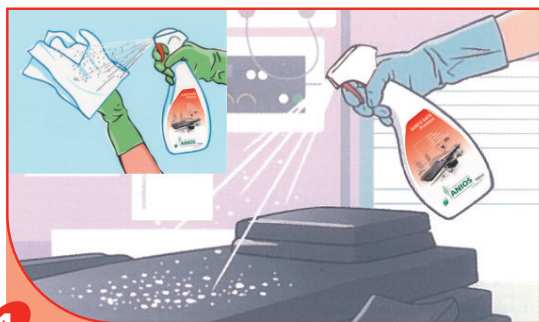

1

Pulvériser en différents points sur la zone à traiter ou de préférence sur un non-tissé propre et sec (préconisée pour le matériel fragile, composé d'électronique...).

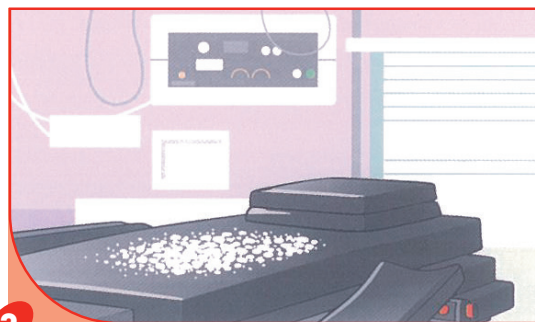

2


L'effet de mousse après pulvérisation est limité dans le temps pour faciliter l'essuyage.

Temps de contact minimum : 3 minutes.



3

Frotter la zone traitée à l'aide d'un non-tissé propre et sec, sans sécher la surface.

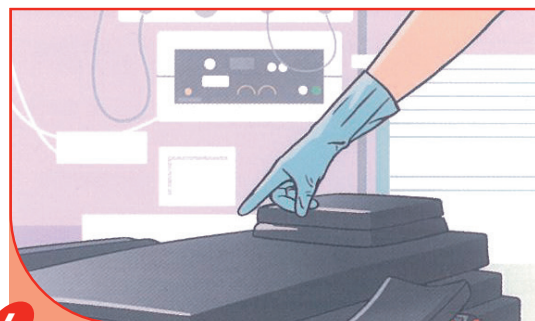

4

Le séchage est rapide et sans trace. Ne pas rincer. (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.